

Сервисный центр: ООО «МедКонтракт»
 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н
Телефоны сервисных центров:
 г. Москва: (495) 989-12-89
 г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02
 г. Екатеринбург: (343) 357-33-61



*Средства реабилитации
 инвалидов: костыли «Armed»:*
 FS923L (размер L, M, S)
 FS933L (размер L, M, S)
 FS937L (размер L, M, S)

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ОПИСАНИЕ

Средства реабилитации инвалидов "Armed": костыли "Armed": FS923L (размер L, M, S), FS933L (размер L, M, S), FS937L (размер L, M, S) (далее по Руководству - костыль) предназначены для применения в период ранней реабилитации после травм и операций на нижних конечностях, а также для самостоятельного передвижения при некоторых заболеваниях неврологического и терапевтического профиля.

Костыли с опорой под локоть облегчают самостоятельное передвижение, перераспределяют нагрузку с нижних конечностей, улучшают равновесие и повышают безопасность при движении, ослабляют нагрузку на кисть и локтевой сустав при ходьбе, восстанавливают двигательную функцию с максимальным комфортом за счет отсутствия давления на сосудисто-нервный пучок в подмышечной впадине.



ПОКАЗАНИЯ

- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы;
- Заболевания, последствия травм, деформация костей нижней конечности, таза, голеностопного сустава, позвоночника при наличии болевого синдрома;
- Врожденная деформация стопы;
- Эндопротезирование сустава нижней конечности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Выраженные нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Потеря функциональности верхних конечностей;
- Психические расстройства;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	FS923L	FS933L	FS937L
Высота костыля (± 10%), мм	765-1165	965-1185	1020-1230
Высота от опоры до захвата (± 10%), мм	220-295	235	230

	FS923L	FS933L	FS937L
Диаметр внешней трубки стойки костыля ($\pm 10\%$), мм	22	22	22
Диаметр внутренней трубки стойки костыля ($\pm 10\%$), мм	19	19	19
Внешний диаметр наконечника ($\pm 10\%$), мм	40	40	40
Внутренний диаметр наконечника ($\pm 10\%$), мм	19	19	19
Максимальная нагрузка, кг	110	110	110
Вес нетто ($\pm 10\%$), гр	540	560	500

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Необходимо убедиться, что опора для кисти расположена свободным концом вперед, манжета при этом надежно крепится в области предплечья – не сжимает и, в тоже время, не болтается.
2. Во время ходьбы держите костыль максимально вертикально.
3. Не ставьте костыль слишком далеко от себя.
4. Используйте костыль только по прямому назначению. Не вешайте на костыль сумки, пакеты и т.д.
5. При спуске или подъеме по лестнице всегда держитесь свободной рукой за поручень.
6. Передвигайтесь очень осторожно по кафелю и не закрепленным коврам и половичкам.
8. В случае падения постарайтесь откинуть костыль в сторону, чтобы не упасть на него.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Высота рукоятки под кисть должна быть такой, чтобы локтевой сустав находился в положении сгибания под углом 10-15 градусов. Также важно правильно рассчитать размер ручки костыля с учетом силы захвата ее рукой. Правильные размеры костыля важны для обеспечения эффективного и безопасного передвижения.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ

	FS923L	FS933L	FS937L
Телескопический			
двухсекционный		v	v
трехсекционный	v		
Рукоять и локтевой обхват пластиковые	v	v	v
Светоотражатель на рукояти			v
Материал стойки костыля - алюминий	v	v	v
Фиксатор			
кнопочный	v	v	
съёмный			v
Резиновый наконечник сменный	v	v	v
Количество ступенчатых регулировок по высоте	10	10	10
Шаг регулировки, мм	25	25	25
Количество ступенчатых регулировок от опоры до захвата	4		
Шаг регулировки, мм	25		

	FS923L	FS933L	FS937L
Устройство противоскольжения выдвижное	v	v*	v*

*ПРИМЕЧАНИЕ: Модель FS933L и FS937L может поставляться и без оснащения УПС.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Влажная обработка мыльными растворами без применения абразивных чистящих средств.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Костыль в упаковке завода-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С, относительной влажности не более 95%.
2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.
3. Костыль транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
4. Транспортировка и хранение костыля без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность костыля. Повреждения костыля, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Костыль не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация костыля осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Костыль _____ 1 шт.
Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции костылей, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Средства реабилитации инвалидов: костыли "Armed": FS923L (размер L, M, S), FS933L (размер L, M, S), FS937L (размер L, M, S) соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04098 действительно с 19.02.2010 г.

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD,
5 Xingfu Rd, zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China
"Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори (Лтд)",

5 Ксингфу Рд, зона А, Шишан Индустриал Парк, Нанхай Дистрикт, Фошан Сити, Китай

Дистрибьютор: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702-73-02

Срок службы - не менее 2 лет.

Гарантийный срок на средства реабилитации инвалидов: костыли "Armed": FS923L (размер L, M, S), FS933L (размер L, M, S), FS937L (размер L, M, S) – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.