



Средства реабилитации
инвалидов: костыли «Armed»:
FS925L (размер L, M, S)
FS925LB (размер L, M, S)
FS935 (размер L, M, S)

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ОПИСАНИЕ

Средства реабилитации инвалидов: костыли «Armed»: FS925L (размер L, M, S), FS925LB (размер L, M, S), FS935 (размер L, M, S) (далее по Руководству - костыли) используется для улучшения координации движений и уменьшения нагрузки на ноги путем увеличения опоры и переноса массы тела на верхнюю часть туловища и рук.

Следует помнить о том, что, неправильно опираясь на платформу, больной может повредить нервные и мышечные структуры руки.



FS925L



FS925LB



FS935

ПОКАЗАНИЯ

- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы;
- Заболевания, последствия травм, деформация костей нижней конечности, таза, голеностопного сустава, позвоночника при наличии болевого синдрома;
- Врожденная деформация стопы;
- Эндопротезирование сустава нижней конечности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Выраженные нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Потеря функциональности верхних конечностей;
- Психические расстройства;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Высота ($\pm 10\%$), мм	Длина от опоры до захвата ($\pm 10\%$), мм	Максимальная нагрузка, кг	Масса ($\pm 10\%$), кг
FS925L	910-1300	180-360	80-110	0,800-0,900
FS925LB	910-1500	160-540	80-110	0,800-0,870
FS935	970-1470	200-540	80-110	0,750-0,950

ПРИМЕЧАНИЕ: В таблице представлены обобщенные технические характеристики костылей для размеров L, M, S. В зависимости от размера диапазон размаха характеристик меняется.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Опираясь, необходимо вес тела перекладывать на руки, а не на подмышечные впадины, для того, чтобы уберечь их от негативных последствий частого сдавливания.
2. Опорные стойки важно размещать как можно ближе к груди, наконечники лучше располагать на расстоянии 10 см от стопы.
3. При передвижении смотреть нужно не под ноги, а вперед, спину держать прямо, коленный сустав здоровой конечности слегка сгибать.
4. Во время ходьбы держите костыли максимально вертикально.
5. Не ставьте костыли слишком далеко от себя.
6. Используйте костыли только по прямому назначению. Не вешайте на костыль сумки, пакеты и т.д.
7. При спуске или подъеме по лестнице всегда держитесь свободной рукой за поручень.
8. Передвигайтесь очень осторожно по кафелю и не закрепленным коврам и половичкам.
9. В случае падения постарайтесь откинуть костыли в сторону, чтобы не упасть на них.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Высота рукоятки под кисть должна быть такой, чтобы локтевой сустав находился в положении сгибания под углом 10-15 градусов.

Также важно правильно рассчитать размер ручки трости с учетом силы захвата ее рукой. Правильные размеры трости важны для обеспечения эффективного и безопасного передвижения.

ВНИМАНИЕ



Костыли трех размеров:

L (большой), M (средний), S (малый).

Малые – под рост от 93-100 см, 100-120 см, 140-160 см.

Средние – под рост от 160 см до 180 см.

Большие – под рост от 180 см до 200 см.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ



Конструкция предусматривает платформу для опоры подмышкой, ручку, двойную планку, переходящую снизу в одну стойку с резиновым наконечником диаметром 43 мм и высотой 54 мм. Костыли имеют зажимы, винты с помощью которых регулируют их высоту.

Стойки костылей (FS935) изготовлены из клееной древесины, а ножка, подмышечник и ручка изготовлены из ударопрочного пластика их прорезиненного гигиеничного материала.

Костыли (FS925L, FS925LB) изготавливаются из легкого алюминиевого сплава, что значительно облегчает вес изделия.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Влажная обработка мыльными растворами без применения абразивных чистящих средств.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Костыли в упаковке завода-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С, относительной влажности не более 95%.
2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.
3. Костыли транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
4. Транспортировка и хранение костылей без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность костылей. Повреждения костылей, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Костыли _____ 1 шт.

Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции костылей, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Средства реабилитации инвалидов: костыли «Armed»: FS925L (размер L, M, S), FS925LB (размер L, M, S), FS935 (размер L, M, S) соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04098 действительно с 19.02.2010 г.

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD.

5 Xingfu Rd, zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

"Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфактори (Лтд)",

5 Ксингфу Рд, зона А, Шишан Индустриал Парк, Нанхай Дистрикт, Фошан Сити, Китай

Дистрибьютор: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н тел.: (812) 702-73-02

Срок службы - не менее 2 лет.

Гарантийный срок на средства реабилитации инвалидов: костыли «Armed»: FS925L (размер L, M, S), FS925LB (размер L, M, S), FS935 (размер L, M, S) – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61