

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Глубина, мм	420
Ширина, мм	440
Высота, мм	800-975
Масса, кг	2,8
Максимальная нагрузка, кг	100
Диаметр колес, мм	100
Облегченный корпус из алюминиевого сплава	
Складные с одним замком	
Передние ножки оснащены колесами	
Регулировка высоты через 2,5 см (8 уровней изменения высоты)	

Средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS912L (далее по паспорту - ходунки) улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.


По сравнению с тростью и костылями, ходунки обеспечивают наибольшую стабильность и устойчивость пациентов за счет более широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной продольной и поперечной устойчивости.

Ходунки изготовлены из алюминия, имеют мягкие накладки на поручни. Ходунки легко складываются и очень удобны при хранении. Передние ножки снабжены колесами, задние - резиновыми наконечниками против скольжения.

Высота ходунков регулируется надежным кнопочным фиксатором, через 2,5 см. Отверстия для регулировки высоты находятся в нижней части передних и задних ножек.

Складывание и раскладывание производится при помощи надежного фиксатора, который расположен на верхней трубке, соединяющей боковые рамы.

Что бы сложить ходунки: нажмите на фиксатор и сдвиньте пластиковый замок, так чтобы фиксатор остался в нажатом положении, боковые рамы сложите внутрь.

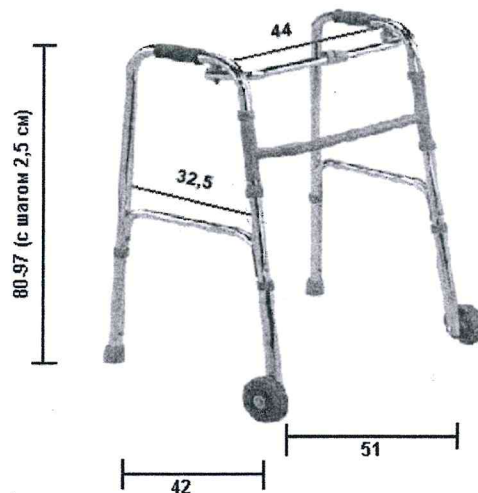

При использовании ходунков следует помнить о том, что:

- для максимальной устойчивости ходунки нужно поднять и затем опустить на все четыре ножки;
- необходимо поддерживать правильную осанку и положение тела;
- не подходить слишком близко к передней перекладине, так как это может уменьшить опору и привести к падению назад.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Упаковка:

Средство реабилитации инвалидов: ходунки «Armed» FS912L - 1 шт.

Паспорт - 1 экз.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS912L соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/06754 действительно от 28.04.2011 г. Срок действия: не ограничен.

Изготовитель: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,

«Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай, 5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

Дистрибьютор: ООО «ВостокМедимпорт»

199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, д. 1, офис 5042

Тел. в г. Москве: (495) 989-12-88

Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02

Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33

Срок службы - не менее 2 лет.

Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS912L – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции. На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Представительство ЮЮ Медикал»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61