



**АРМЕД®**  
NON PROGREDI. EST REGREDI

Средство реабилитации  
инвалидов: ходунки «Armed»  
FS913L

## ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Длина, мм	500
Ширина, мм	430
Высота, мм	800-950
Масса, кг	2,4
Максимальная нагрузка, кг	150
Облегченный корпус из алюминиевого сплава	
Складные с одним замком	
Универсальные (пошаговые (передвижение «шагом» (поочередная перестановка левой и правой стороны)) / непошаговые с функцией переключения	
Регулировка высоты через 2,5 см (7 уровней измене- ния высоты)	

**Средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS913L** (далее по паспорту - ходунки) улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

По сравнению с тростью и костылями, ходунки обеспечивают наибольшую стабильность и устойчивость пациентов за счет более широкой базы для поддержки и опоры, улучшенной продольной и поперечной устойчивости.

Ходунки изготовлены из алюминия, имеют накладные ручки из резины и пластика. Ходунки могут складываться и очень удобны для хранения. Ножки снабжены резиновыми наконечниками против скольжения. Мягкие накладки на поручни.

**При использовании ходунков следует помнить о том, что:**

- для максимальной устойчивости ходунки нужно поднять и затем опустить на все четыре ножки;
- необходимо поддерживать правильную осанку и положение тела;
- не подходить слишком близко к передней перекладине, так как это может уменьшить опору и привести к падению назад.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

**Упаковка:**

Средство реабилитации инвалидов: ходунки «Armed» FS913L - 1 шт.

Паспорт - 1 экз.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

**Средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS913L** соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/06754 действительно от 28.04.2011 г. Срок действия: не ограничен.

**Изготовитель:** Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, Ltd,

«Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори», (Лтд), Китай, 5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

**Дистрибьютор:** ООО «ВостокМедимпорт»

199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, д. 1, офис 5042

**Тел. в г. Москве: (495) 989-12-88**

**Тел. в г. Санкт-Петербурге: (812) 702-73-02**

**Тел. в г. Екатеринбурге: (343) 368-12-33**

**Срок службы - не менее 2 лет.**

Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed» FS913L – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции. На быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

**Сервисный центр:** ООО «Представительство ЮЮ Медикал»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

**Телефоны сервисных центров:**

**г. Москва: (495) 989-12-89**

**г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02**

**г. Екатеринбург: (343) 357-33-61**