

Средства реабилитации
инвалидов: трость Armed:
FS910L, FS920L, FS927L,
FS929L, FS9206L


ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ОПИСАНИЕ

Средства реабилитации инвалидов: трость Armed: FS910L, FS920L, FS927L, FS929L, FS9206L (далее по Руководству - трость) предназначены для облегчения передвижения инвалидов и пациентов с малой и средней степенью нарушения координации движений. Трости обеспечивают поддержку пациента во время ходьбы. Трость можно использовать при ходьбе на улице или в домашних условиях.

Для эффективного использования трости необходимо держать ее в руке, противоположной слабому или больному бедренному, коленному или голеностопному суставу, и одновременно перемещать ногу и трость. Это улучшает балансировку и устойчивость, и снимает напряжение с больной или более слабой половины тела.

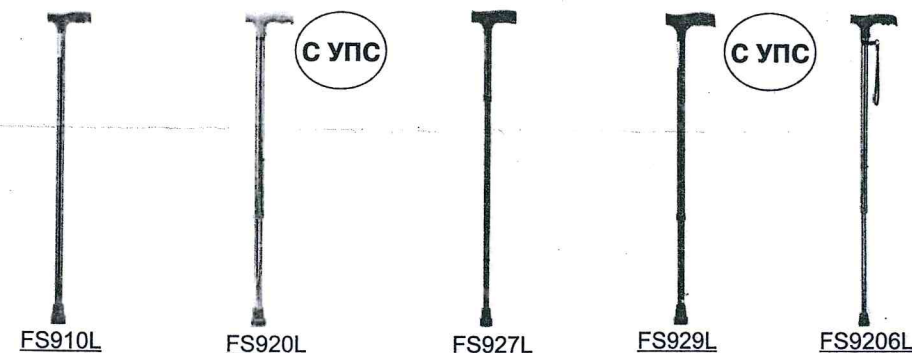

ПОКАЗАНИЯ

- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы;
- Заболевания, последствия травм, деформация костей нижней конечности, таза, голеностопного сустава, позвоночника при наличии болевого синдрома;
- Врожденная деформация стопы;
- Эндопротезирование сустава нижней конечности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Выраженные нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Потеря функциональности верхних конечностей;
- Психические расстройства;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Высота трости (± 10%), мм	Максимальная нагрузка, кг	Вес нетто (± 10%), гр
FS910L	900	100	350
FS920L	700-925	100	400
FS927L	800-900	100	350
FS929L	720-945	100	350
FS9206L	710-935	100	310

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием необходимо проверить наконечник на предмет повреждений. Не используйте неисправную трость.
2. Для телескопических тростей проверяйте, плотно ли защелкнут фиксирующий элемент.
3. Во время ходьбы держите трость максимально вертикально.
4. Не ставьте трость слишком далеко от себя.
5. Используйте трость только по прямому назначению. Не вешайте на трость сумки, пакеты и т.д.
6. При спуске или подъеме по лестнице всегда держитесь свободной рукой за поручень.
7. Зимой выходите на улицу с тростью, оснащенной устройством против скольжения.
8. Передвигайтесь очень осторожно по кафелю и незакрепленным коврам и половичкам.
9. В случае падения постарайтесь откинуть трость в сторону, чтобы не упасть на нее.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Чтобы определить правильную длину трости, нужно встать прямо, не снимая обуви. Опустить руки по бокам. Длина трости должна равняться расстоянию от линии изгиба запястья до пола. Высота рукоятки под кисть должна быть такой, чтобы локтевой сустав находился в положении сгибания под углом 10-15 градусов.

Правильные размеры трости важны для обеспечения эффективного и безопасного передвижения.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ

1. Трость FS920L, FS929L, FS9206L - телескопическая, двухсекционная.
Трость FS927L - телескопическая, складная четырехсекционная.
Трость FS910L - односекционная.
2. Трости FS920L, FS929L оснащены устройством против скольжения (модель FS920L также может не оснащаться УПС).
3. Трости изготовлены из алюминиевого сплава. Защищены от коррозии хромированием или полимерным покрытием с применением метода порошкового напыления.
4. Т-образная рукоятка изготовлена из пластика или дерева. Рукоятка обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.
5. Опорная насадка резиновая, прочная, не скользящая, сменная. Регулярно проверяйте наконечник. Своевременно заменяйте наконечник трости.
6. Телескопический элемент для тростей FS920L, FS929L, FS9206L имеет 10 ступенчатых регулировок по высоте с помощью надежного кнопочного фиксатора. Шаг регулировки каждые 2,5 см. Для трости FS927L телескопический элемент имеет 5 уровней ступеньчатой регулировки по высоте с помощью надежного кнопочного фиксатора. Шаг регулировки каждые 2,5 см.
7. Конструкция тростей обеспечивает комфорт и устойчивость.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Влажная обработка мыльными растворами без применения абразивных чистящих средств.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Трость в упаковке завода-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С, относительной влажности не более 95%.
2. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.
3. Трость транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
4. Транспортировка и хранение трости без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность трости. Повреждения трости, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.
5. Трости не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация тростей осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Средство реабилитации инвалидов: трость _____ 1 шт.
Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции тростей, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Средства реабилитации инвалидов: трость Armed: FS910L, FS920L, FS927L, FS929L, FS9206L соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07911 действительно с 08.10.2010 г.

Изготовитель: "Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, (LTD)",

5 Xingfu Rd, zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

"Фошан Донфанг Медикал Эквипмент Мануфактори (Лтд)",

5 Ксингфу Рд, зона А, Шишан Индустриал Парк, Нанхай Дистрикт, Фошан Сити, Китай

Дистрибьютор: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702-73-02

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок на средства реабилитации инвалидов: трость Armed: FS910L, FS920L, FS927L, FS929L, FS9206L – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашиваемые части гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

г. Москва: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61